

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: A00196
Bileşenleri: Klorhesidindiglukonat
Paketleme: 250 ml.

PROCHEX %2 KLORHEKSİDİN DİGLUKONAT İRİGASYON SOLUSYONU

1- Açıklama

Debrisi kaldırmak amacıyla kök kanallarının yıkanmasında kullanılan solüsyondur.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Kök kanal preparasyonunu hızlandırır. Mekanik preparasyon sırasında kök kanalın kayganlaşmasını sağlar.

3- Kullanım şekli

Mekanik preparasyon sırasında kök kanalın içerisine, irigasyon ucu ile solüsyonu enjekte ediniz. Sonra kanalı su ile iyice durulayınız.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Canlı dokulara temas etmesi halinde iritasyona sebep olabilir.

6- Uyarı:

Mukozaya bulaşması halinde iritasyona sebep olabilir. Bulaşma halinde bulaşan yeri bol su ile yıkayınız.

Yalnızca profesyonel diş hekimleri tarafından uygulanabilir.

Şişelerinin ağızları daima sıkıca kapalı tutulmalıdır.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr