

## KULLANMA TALİMATI

Katalog No: RS0520

Bileşenleri:

Toz: Çinko oksit ve magnezyum oksit.

Likit: Poliakrilik asit.

Paketleme: 80 gr. toz, 40 gr. likit

## PROPOLY ÇİNKO-PROCEMENT POLİKARBOKSİLAT SİMAN

### 1- Açıklama

**PROPOLY**, pulpaya karşı irritasyon özelliği olmayan, dentin dokusuna doğal yapışma sağlayan, kendi likidiyle aktive olan çinko polikarboksilat simandır.

### 2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

**PROPOLY** Amalgam ve kompozit dolguların altında kavite örtücü olarak kullanılabilir. Bağlanma kuvvetinin yüksek olması için dişin nemli kalması öngörülür.

### 3- Kullanım şekli

Kullanmadan önce toz şişesinin kapağına hafifçe vurunuz. Kaşık yardımıyla bir dolu kaşık toz doldurunuz ve şişenin ağzını sıkıca kapatınız. Damlalıklı şişeyi dik tutunuz likidin damla oranına dikkat ediniz. Liner veya geçici restoratif materyal için 3 silme kaşık toz için 8 damla likit (2,8 gr. toz için 1 gr. likit)

Karıştırma kağıdında yapılan bu karıştırma süresi 40-60 saniyedir. Çalışma süresi 2-2,5 dakikadır. Sertleşme süresi ise 3-6 dakikadır. Yapıştırma siman olarak kullanımı için 2 silme kaşık toz için 6 damla likit (2,3 gr. toz 1 gr. likit).

Karıştırma kağıdında yapılan bu karıştırma süresi 40-60 saniyedir. Çalışma süresi 2-4 dakikadır. Sertleşme süresi ise 4-8 dakikadır.

### 4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

### 5- Yan etkiler

Karıştırma anında yüksek asitliğe sahip olması nedeniyle mukozaya değmesi halinde irritasyona sebep olabilir.

### 6- Uyarı:

Oral doku ile temas etmesi halinde alkollü pamuk ile hemen uzaklaştırınız. Su ile yıkayınız. Likit cilt ve gözde tahrişe sebep olabilir. Cilt veya göz ile temasında bol su ile yıkayınız. Ürünü pulpa kaplama materyali olarak uygulamayınız. Likit tek başına kullanılmadan önce asidik PH'ya sahiptir. Kullanım sırasında rubberdam ile hastanın mukozasını koruyunuz. **Ürünü kullanırken lateks eldiven ile kullanınız, likit ile temastan kaçınız.**

### 7- Saklama koşulları:

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan

koruyunuz.

Ürünü kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

### NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**\*\* Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

	Lot Numarası		İmalat Tarihi
	Katalog Numarası		İmalatçı
	Süresinde kullanınız		Güneş ışığından uzak tutunuz
	Uyarı, Beraberinde Verilen Dökümanlara Başvurunuz		Kullanma Talimatlarına Başvurunuz.
	Kuru yerde saklayınız.		Onaylanmış Kuruluş

### 8- Semboller ve Anlamları:

 **PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

[info@promida.com.tr](mailto:info@promida.com.tr) www.promida.com.tr

Döküman No: TF.02.124 Yayın Tarihi: 01.11.2022 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi: 15/02/2024