

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: RE1675

Bileşenleri:

Toz: Çinko Oksit, rezin ve diğer yardımcı malzemeler.

Likit: Ojenol ve diğer yardımcı malzemeler.

Paketleme: 14 gr. toz 10 mL likit.

PROCANAL G – KANAL DOLGU MADDESİ

1- Açıklama

Kök kanalını doldurmak için Gütta-percha konları ile kullanılan bir endodontik simandır. Bakterisidal özelliğindedir. Homojen karıştırılır ve kremi yapısı Gütta-percha konunun kanala kolay yerleştirilmesini sağlar. Kanalda Gütta-percha konunun yapışması ve sızdırmazlığı sağlar. Uygulama sonrasında çözülmez. Dişte renklenme yapmaz, kolay sökülebilir. Radyoopaktır.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Kanal içi dolgu materyali olarak kullanılan bir endodontik simandır. Gütta-percha konları kullanılan kanal dolum tekniklerinde endikedir.

3- Kullanım şekli

Gütta-percha konunu seçiniz; Bir karıştırma camına 1 – 2 damla likitten damlatınız ve bir miktar tozu ilave ederek, 1-2 dakika boyunca, kalın, yoğun ve pürüzsüz yüzeyli kremi bir yapı oluşuncaya dek karıştırınız; İdeal yoğunlukta, spatül kütlede uzaklaştırılırken 2 cm kadar uzayacaktır. Gütta-percha konunu tamamen simana buladıktan sonra, kanalı, uygun endodontik yöntemle göre doldurunuz.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Tahriş edicidir ve içeriğindeki ojenol sebebiyle alerjen etki gösterebilir. Sedasyona yol açabilir. Uygulama sırasında rubberdam ile mukozayı koruyunuz.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr

6- Uyarı:

Toleransı iyi olmasına rağmen periapikal doku üzerine taşırmamaya özel dikkat gösterilmesi önerilir. Mukozaya değmesine engel olmak için rubberdam kullanabilirsiniz.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.