

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: C10920
Bileşenleri: Ahşap malzeme.
Paketleme: 100 adet.

PROKAMA – AHŞAP KAMA

1- Açıklama

Ahşap olarak imal edilmiş dört farklı kalınlık seçeneği mevcut olan kamalardır. Her renk farklı kalınlığı ifade etmektedir.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Kamalar, diş separasyonu sağlar ve interproksimal bölgenin anatomik diş ve doku hatlarını koruyarak matrisin kaymasını önler. Konkav bölümleri interdental kontura uyum sağlar.

Prokama diş anatomisi ile uyumludur:

- Üçgen kenarlar interdental kontura uyum sağlar.
- Dikdörtgen köşeler, kamaların kolay yerleştirilmesi ve çıkarılmasını sağlar.

3- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

4- Uyarı:

Yutulmamasına dikkat edilmelidir.

5- Saklama koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.