

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: RD1460
Bileşenleri: %37 ortofosforik asit, dolgu maddesi.
Paketleme: 3 gr ve 50 gr şırınga,

PROETCH – ASİT JEL

1- Açıklama

Mine ve dentin hazırlanmasında kullanılan %37 fosforik asittir.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Total etch tekniğine göre mine ve dentin yüzeylerinin hazırlanmasında kullanılır. Mavi rengi sayesinde yüzeyde kolay görülebilir. Jelin uygun kıvamı kolay kullanılmasını sağlar.

3- Kullanım şekli

- Kompozit restorasyonlar için kullanılan genel talimatlara göre kaviteyi hazırlayınız.
- Preparasyonu temizleyiniz ve kurutunuz.
- Restore edilecek mine ve dentin üzerine asit jel uygulayınız ve 15-20 saniye yüzeyde bırakınız.
- Asit jeli, en az 5sn boyunca tamamen yıkayınız ve hafifçe hava sıkarak, preparasyon yüzeyinden fazla suyu uzaklaştırınız.
- Preparasyon yüzeyinde hiç asit kalmadığından emin olunuz.
- Florozlu mine varsa, 2 ve 3 nolu adımları tekrarlamak gerekebilir.
- Üreticinin talimatlarına göre bonding sistemini uygulayınız.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Yüksek asit içeriğinden dolayı diş eti vb yumuşak dokularda iritasyona sebep olabilir.

6- Uyarı:

Bazı taban astarlama maddeleri asitte çözünebildiğinden, asite dayanıklı maddeler kullanınız. Gözle, deriyle ve mukozayla temasında hassasiyete sebep olabilir, temas eden bölgeyi hemen bol su ile yıkayınız. Mukozaya değmesini engellemek için rubberdam kullanabilirsiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Sadece diş hekimliğinde profesyonel kullanıma uygundur. Kullanım sonrasında şırınganın ağzını kapatınız.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr