

## KULLANMA TALİMATI

Katalog No: A00376

Bileşenleri: Çürük belirleyici ajan, su, gliserin ve yardımcı maddeler

Paketleme: 2,5 mL. şırınga

## PROPİND PLAK İNDİKATÖR JELİ

### 1- Açıklama

PROPİND gibi plak indikatörleri, diş temizliği esnasında, bakteri plaklarının görünür hale getirilerek uzaklaştırılmasını sağlar.

### 2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

PROPİND, dişteki bakteri plaklarının tespiti için kullanılır.

### 3- Kullanım şekli

Dişi tam olarak izole ediniz, dişleri yıkayıp kuruladıktan sonra, ilgili bölgeye bir miktar PROPİND sürünüz. Dişe jeli sürmek için fırça vb. aksesuarlar kullanılabilir. 10 saniye bekleyiniz ve su ile yıkayınız. Pembeye boyanmış olan alanları uzaklaştırınız

### 4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

### 5- Yan etkiler

Bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

### 6- Uyarı:

Çapraz kontaminasyon ya da enfeksiyonu önlemek için ürünü doğrudan doğruya şişesinden ya da şırıngadan uygulamayınız (disposibl bir uygulama ucu kullanınız) Deriye, göze ya da giysilere direkt temasından sakınınız. Göze temas halinde: su ile iyice yıkayınız ve doktorunuza baş vurunuz.

### 7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

### NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**\*\* Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.