

## KULLANMA TALİMATI

Katalog No: A00346  
Bileşenleri: Aromatik solvent  
Paketleme: 10 ml.

## PROGSOLV GUTTAPERCHA ÇÖZÜCÜ

### 1- Açıklama

Gutta perchanın çözülmesi için kullanılan doğal aromatik bileşendir.

### 2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Kanal tedavisinden sonra gutta perchanın çıkarılması gerektiği durumlarda çözücü olarak kullanılır.

### 3- Kullanım şekli

Progsolv'den pamuk pellete çok az damlatılarak, çıkarmak istenilen guttan perkanın bulunduğu pulpa odasına konur ve 5-10 sn. sonunda pamuk pellet alınır. Sonra gutta perkeyi kolayca çıkarabilirsiniz.

### 4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

### 5- Yan etkiler

Diş eti gibi yumuşak dokulara sızması halinde iritasyona sebep olabilir.

### 6- Uyarı:

Göz, cilt veya mukoza ile temasında bol su ile yıkayınız. Mukozaya değmesini önlemek için rubberdam ile kullanınız. İçeriğinden herhangi birine karşı bilinen bir alerji durumu varsa solüsyonu kullanmayınız. Sadece profesyonel diş hekimleri tarafından kullanılabilir.

### 7- Saklama koşulları

Tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

### NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**\*\* Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

[info@promida.com.tr](mailto:info@promida.com.tr) [www.promida.com.tr](http://www.promida.com.tr)