

## KULLANMA TALİMATI

Katalog No: RS0506  
Bileşenleri: Ojenol  
Paketleme: 10 ml. veya 20 ml.

### PRONOL OJENOL

#### 1- Açıklama

Sadece karanfil yağına bağlı ojenol içermektedir, başka herhangi bir ajan ihtiva etmez. Çinko Oksit ile karıştırıldığında genelde kaide maddesi ve geçici dolgu olarak kullanılan bir siman oluşturan likittir.

#### 2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Çinko oksit bazlı ürünlerin macun haline getirilmesinde kullanılır.

#### 3- Kullanım şekli

Bir karıştırma plağı üzerine maksimum 2 ya da 3 damla EUGENOL damlatınız, Çinko Oksit ilave ediniz ve istenilen kıvam elde edilinceye kadar karıştırınız.

#### 4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

#### 5- Yan etkiler

Tahriş edicidir ve içeriğindeki ojenol sebebiyle alerjen etki gösterebilir. Sedasyona yol açabilir. Uygulama sırasında rubberdam ile mukozayı koruyunuz.

#### 6- Uyarı:

Göz, cilt veya mukoza ile temasında bol su ile yıkayınız. Mukozaya değmesini önlemek için rubberdam ile kullanınız. İçeriğinden herhangi birine karşı bilinen bir alerji durumu varsa solüsyonu kullanmayınız. Sadece profesyonel diş hekimleri tarafından kullanılabilir. Polimerize olmuş kompozit materyallerle birlikte kullanılmamalıdır. Uterus'ta kasılmalar provoke olduğunda, hamileler için yüksek kontrendikedir.

#### 7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

#### NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**\*\* Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



**PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

[info@promida.com.tr](mailto:info@promida.com.tr) [www.promida.com.tr](http://www.promida.com.tr)