

## KULLANMA TALİMATI

Katalog No : A00106  
Bileşenleri: Krezol, formaldehit ve gliserin.  
Paketleme: 20 ml.

## FORMOCRESOL – KÖK KANAL DEZENFEKTANI

### 1- Açıklama

FORMOCRESOL, krezol, formaldehit ve gliserin (Buckley's formocresol solüsyonu) içeren bir kök kanal temizleme solüsyonudur. Formokrezol, temizleme ajanı olarak kullanımının yanı sıra, süt dişlerinde pulpotomi amacıyla da kullanılmaktadır.

### 2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Formocresol, temizleme ajanı olarak kullanımının yanı sıra, süt dişlerinde pulpotomi amacıyla da kullanılmaktadır.

### 3- Kullanım şekli

Hastanın tedavi edilecek dişini rubber dam ile izole ediniz. Kanalı normal şekilde hazırlayınız. Bir parça pamuk topuna solüsyonu emdiriniz ve fazlasını kuru pamuk parçaları arasında sıkınız. Kanal uygun bir el aleti ile yerleştiriniz. Üstünü geçici olarak kapatıp bir süre bekleyiniz. Sonra pamukları çıkarınız. Gerektiğinde bu işlemi tedavi tamamlanana kadar tekrarlayınız.

FORMOCRESOL'un Amputasyon işleminde kullanımı ;

Vital amputasyon tekniği uygulanacak süt azıları anestezi ile uyuşturulur. Süt azılarının kavite hazırlıkları yapılır. Vital amputasyon teknikleri uygulanacak azıların pulpa odalarının tavani uygun bir frez ile kaldırılır. Pulpa odası uygun bir aletle ile kanal ağzlarına 1-2 mm girilene kadar boşaltılır. FORMOCRESOL solüsyonu emdirilmiş küçük pamuk toplarının fazlalıkları kuru pamuk arasında sıkılarak kanal ağzları üzerine yerleştirilir ve 5 dk. süre ile bekletilir. Sonra pamuk topları alınır. Daha sonra ampütasyon patı elde edilir. Amputasyon patı kanal ağzları üzerine konulur ve küçük pamuk topları yardımıyla basınç yapmadan yerleştirilir. Kaide maddesi konularak restorasyon kapatılır.

### 4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

### 5- Yan etkiler

Canlı dokuya sızması halinde irritasyona ve doku harabiyetlerine sebep olabilir. Formaldehit bileşikler pulpa sınırları içinde kalmayıp yumuşak ve sert dokulara sızarak sinirlerin destrüksiyonuna, alerjik yanıtlara, parestezi ve lokalize nekrozlara neden olabilir.

### 6- Uyarı:

Formaldehit içeriğinden dolayı çok dikkatli kullanınız. Formaldehitin mutajenik ve karsinojenik potansiyele sahip olduğu bazı hayvan çalışmalarından bilinmektedir. Bu ürün yutulduğunda ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Likidi direk olarak diş uygulamayınız mutlaka emici olan bir pamukla eser miktarlarda uygulayarak kullanılmalıdır. ASLA uygulama sonrasında diş içerisinde bırakmayınız.

Göz, cilt, mukoza veya başka bir yer temasında bol su ile yıkayınız. Mutlaka kullanım esnasında rubberdam ile ağız ortamını izole ediniz. İçeriğinden herhangi birine karşı bilinen bir alerji durumu varsa solüsyonu kullanmayınız.

Ürünü kullanırken lateks eldiven ile kullanınız, temastan kaçınız.

### 7- Saklama koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz. Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

### NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**\*\* Bertaraf:** Ürünler biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

[info@promida.com.tr](mailto:info@promida.com.tr) [www.promida.com.tr](http://www.promida.com.tr)