

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: A00391

Bileşenleri: PC asit fenik ve diğer yardımcı maddeler.

Paketleme: 10 mL.

PRORCD KÖK KANAL DEZENFEKSİYONU İÇİN FENİK ASİT

1- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Kanal Tedavide antiseptik olarak kullanılır. Kök kanal tedavisinde artık doku ve nekrotik materyalin uzaklaştırılması ve temizlenmesinde endikedir. Güçlü bir antiseptiktir.

2- Kullanım şekli

Bir pamuk veya benzeri lifli bir maddeye emdirilerek tedavi alanına yerleştirilir. Bir süre bekletildikten sonra pamuk oradan alınarak tedaviye devam edilir.

3- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

4- Yan etkiler

Canlı dokuya sızması halinde irritasyona ve doku harabiyetlerine sebep olabilir. Formaldehit bileşikleri pulpa sınırları içinde kalmayıp yumuşak ve sert dokulara sızarak sinirlerin destrüksiyonuna, alerjik yanıtlara, parestezi ve lokalize nekrozlara neden olabilir.

5- Uyarı:

Formaldehit içeriğinden dolayı çok dikkatli kullanınız. Formaldehitin mutajenik ve karsinojenik potansiyele sahip olduğu bazı hayvan çalışmalarından bilinmektedir. Bu ürün yutulduğunda ölüme varan sonuçlar doğurabilir. Likidi direk olarak dişe uygulamayınız mutlaka emici olan bir pamukla eser miktarlarda uygulayarak kullanılmalıdır. ASLA uygulama sonrasında diş içerisinde bırakmayınız. Göz, cilt, mukozaya veya başka bir yer temasında bol su ile yıkayınız. Mutlaka kullanım esnasında rubberdam ile ağız ortamını izole ediniz. İçeriğinden herhangi birine karşı bilinen bir alerji durumu varsa solüsyonu kullanmayınız. Ürünü kullanırken lateks eldiven ile kullanınız, temastan kaçınınız.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr

6- Saklama koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünler biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.