

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: C10622

Bileşenleri: Pomza, aroma, renklendirici, gliserin, su ve bağlayıcı

Paketleme: 200, 100, 50 adetlik ambalajlardadır.

PROPHY P – PARLATMA PASTASI

1- Açıklama

PROPHY P hoş bir tada sahiptir. Bileşiminde sakarin bulundurmaz. Farklı renk ve tatlarda yeterli yoğunluktadır. Uygulanma sırasında akma yapmaz. PROPHY P detertraj tedavisinde, dişin parlatılması ve temizlenmesi için kullanılır. İşlemler sırasında, minenin çizilme ve aşınmasına neden olmaz. PROPHY P'nin bileşimindeki aromalar yardımcıyla hastanın işlemi kolay tolere etmesine, yardımcı olur. Ağzında hoş tat bırakır.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Periodontal temizliğin ardından kalan ince tartırların uzaklaştırılmasını sağlar. Yiyecek, içecek ve sigaradan oluşan renklenmeleri temizler. Diş renginin açılmasına yardım eder. Kompozit dolgudan önce diş temizliğinde indikedir. Dentaltübülleri asla kapamaz ve bağlantıyı engellemez. Kompozit esaslı dolguların parlatılmasında kullanılabilir. Detertraj işlemi sırasında tartarların kolaylıkla dişten ayrılmasına yardımcı olur. Detertrajabrazyonunu olabildiğince engeller.

3- Kullanım şekli

Bir miktar patı polisaj fırçasına alınır ve uygun şekilde diş yüzeyine uygulanır.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

5- Yan etkiler

Bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

6- Uyarı:

Bileşimindeki kimyasallara alerjisi olanların, kullanması sakıncalıdır. Tedavi sonrası veya sırasında ağız çalkalanması yapılabilir. Kullanıldıktan sonra pastanın kapağı kapatılarak, ürünün korunması sağlanmalıdır.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz. Kullanım sonrası kapağını kapatarak aktivasyonunu koruyunuz.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMIDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr