

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: C10910

Bileşenleri: Alüminyum oksit kaplı malzeme.

Paketleme: 4 farklı aşındırıcı gren boyutu ve 2 farklı disk çapı. 80 adet.

PRODİSK – KOMPOZİT PARLATMA DİSKİ

1- Açıklama

Kompozit yüzeyini bitim ve cila aşamasında kullanılır. Alüminyum oksit kaplı esnek cilalama diskleridir. 4 farklı aşındırıcı gren boyutu (kalından süper inceye) ve 2 farklı disk çapı. Her farklı gren boyutu için özel renkleri vardır. Akıllı mandrel sistemi sayesinde kolay takılıp çıkarılabilir. Kırılmaya dirençli ve steril edilebilen metal mandrel her marka diske uygundur. İstenilen miktarda kutulanabilir. Sadece yedekler halinde de satılmaktadır.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamak amacıyla kullanılır. Ortadaki zımparasız alan, interproksimal alanlara girmeyi kolaylaştırır

3- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

4- Uyarı:

Yutulmamasına dikkat edilmelidir. Diskin fırlamasına özen gösterilmelidir.

5- Saklama koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.