

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: C10550

Bileşenleri: Sodyum bikarbonat, aroma ve stabilizatör.

Paketleme: 300 gr. toz

PROAIR F – AIRFLOW TOZU

1- Açıklama

PROAIR F - AIR-FLOW Tozu sadece dişeti üstü tedavilerinde kullanılır.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Lekelerin/reng değişimlerinin ve diş plaklarının temizlenmesinde, Dolgu macunların yerleştirilmesi için plakları temizlemesinde, Beyazlatma prosedüründen önce plak ve lekeleri temizlemesinde, Ortodonti hastalarının plak ve lekelerini etkin bir şekilde temizlemesinde, Renk tonu tespiti için lekelerin temizlenmesinde kullanılır.

3- Kullanım şekli

Bu ürünü kullanmadan önce, cihazınız ve sistemle birlikte size orijinal olarak verilen talimat el kitapçığı tavsiyelerini lütfen dikkatlice okuyup güvenlik tedbirlerine uyunuz.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Kronik bronşit veya astım sorunu olan hastalar ve kullanıcılar hiçbir koşulda havali polisaj cihazı ile tedavi edilmemelidir. Püskürtülen hava ve toz solunum zorluklarına sebep olabilir. Üst solunum yolları rahatsızlığı bulunan hastalarda kullanılmamalıdır. Düşük tuz diyetinde olan hastalar (örneğin arteriyel hipertansiyon), toz sodyum bikarbonat ihtiva ettiği için bu tozla tedavi edilmemelidir. Toz içinde bulunan aromalar, özel durumlarda alerjik durumlara yol açabilir. Onarıma zarar verebileceği için, püskürtülen tozu dolgulara, diş kuronlarına veya köprülere yöneltmeyin. Bu tozu dişeti altı için kullanmayın. Tedavi tavsiyeleri Hasta ve kullanıcı göz koruyucu takmalıdır.

Kullanıcı maske takmalıdır. Maksimum koruma için, ağız içinde uzun pamuk ruloları kullanın. Diş ünitenizin boşaltıcısını yüksek hızda kullanın.

6- Uyarı:

Kullandığınız cihazın toz haznesi içinde gösterilen toz doldurma sınırını aşmayınız. Bu toz şeker içermez. Cihazınız ve sistemle birlikte size orijinal olarak verilen talimat el kitapçığı tavsiyelerini lütfen dikkatlice okuyup güvenlik tedbirlerine uyunuz.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında karanlık alanda saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz. Kullanım sonrası kapağını kapatarak aktivasyonunu koruyunuz. Toz ısı kaynaklarının veya asitlerin yakınında muhafaza edilmemelidir. Şişe açık bırakılırsa, toz topaklanabilir ve cihazın tıkanmasına neden olabilir. Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünler biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr