

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: RS0640 ve RS0641

Bileşenleri:

Toz: Çinko oksit.

Likit: Karanfil yağı, asetik asit

Paketleme: 20 ml. Likit, 75 gr. Toz

40 gr toz, 10 ml. likit.

PROZOE CEMENT ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN

1- Açıklama

Çinko oksit-öjenol bazlı geçici dolgu simanı olan Prozoe Cement' in pH'si 7–8 dir. Materyalin elle hazırlanması kolaydır. Geçici dolgu maddesi olarak kullanıldığında, çiğneme kuvvetlerine karşı koyabilecek kadar dayanıklıdır. Bununla beraber çıkarılması da kolaydır. Kavite duvarlarına iyi tutunur.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Diş hekimliğinde çinko oksit-öjenol bazlı Siman, geçici dolgu materyali olarak endikedir.

3- Kullanım şekli

Gerekli miktarda toz ve likit, soğuk ve kuru bir siman camı üzerinde pürüzsüz bir macun kıvamı elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. Karıştırma oranı yaklaşık olarak 1g toz / 0.3 g likittir. En uygun kıvam, camcı macunu kıvamındaki pasta kıvamıdır. Bu

kıvamdan hafifçe farklı kıvamlar kabuledilebilirdir.

Karıştırma zamanı: yaklaşık olarak 1,5-2 dakika. Ağız içersinde sertleşme süresi: 4-6 dakika.

Ağız dışında sertleşme süresi: yaklaşık olarak 6-7 dakika.

4- Kontraendikasyonlar

Öjenol, kompozitin katalizör sistemini ters etkilediği için, kompozit dolgulardan önce ya da kompozit dolguların altında kullanılmaz.

5- Yan etkiler

Tahriş edicidir ve içeriğindeki öjenol sebebiyle alerjen etki gösterebilir. Sedasyona yol açabilir. Uygulama sırasında rubberdam ile mukozayı koruyunuz.

6- Uyarı

Cilt veya göz ile temasında bol su ile yıkayınız. Yalnızca profesyonel diş hekimleri tarafından uygulanabilir. Toz, kolayca likidi absorbe eder. En uygun sonucu almak için, doğru toz/likit oranına uyulmalı ve karışım iyice spatüle edilmelidir. Toz ve likit şişelerinin ağızları daima sıkıca kapalı tutulmalıdır. Özellikle toz, nemle temas ederse nem sertleşme zamanını hızlandıracaktır. Çinko Oksit Öjenol Siman, siman camı ve aletlerden etanol kullanılarak temizlenebilir.

7- Saklama koşulları

Oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

	Lot Numarası		İmalat Tarihi
	Katalog Numarası		İmalatçı
	Süresinde kullanınız		Güneş ışığından uzak tutunuz
	Uyarı, Beraberinde Verilen Dökümanlara Başvurunuz		Kullanma Talimatlarına Başvurunuz.
	Kuru yerde saklayınız.		Onaylanmış Kuruluş

8- Semboller ve Anlamları:

 **PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr

Döküman No: TF.01.124 Yayın Tarihi: 01.11.2022 Revizyon No:01 Revizyon Tarihi: 15/02/2024