

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: C10625

Bileşenleri: Elmas partikülleri, gliserin, bağlayıcı.

Paketleme: 3 gr. şırınga

PRODIAMOND ELMAS İÇERİKLİ PARLATMA PASTASI

1- Açıklama

PRODiamond elmas içerikli hem ağız içinde hem ağız dışındaki uygulamalarda kullanılabilen restorasyon ve doğal diş yüzeylerinde uygulanabilir yüksek parlatma özelliği olan bir polisaj pastasıdır.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

PRODiamond bütün klinik ve laboratuvar kompozit materyallerinde, reçine içerikli sert restorasyon dolgularında, metal, seramik, porselen uygulamalarında kullanılabilir.

3- Kullanım şekli

Şırınganın ucuna uygulama ucu takılır. Az miktarda pastayı keçe vb. malzeme ile belirlenmiş alana uygulayınız. Kuru alan gerektirmez, ıslak zeminde de uygulanabilir. Uygulama sonrası doğrudan su ile pastayı temizleyebilirsiniz.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Bilinen bir yan etkisi yoktur.

6- Uyarı:

Şırınganın ağzını kullandıktan sonra kapalı olarak saklayınız. İçeriğinden herhangi birine karşı bilinen bir alerji durumu varsa kullanmayınız. Ürünü kullanırken lateks eldiven ve koruyu gözlük ile kullanınız. Eğer ürün kurursa su ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Eğer soğuktan dolayı donarsa sıcak bir ortamda çözerek tekrar kullanabilirsiniz. Sıcrama ve aşırı ısınmadan korunması için 10.000 rpm altında kullanılması tavsiye edilir.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMİDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr