

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: A00361

Bileşenleri: Çürük belirleyici ajan, su, gliserin, mavi-mor (gıda-kozmetik) boyası ve yardımcı maddeler.

Paketleme: 3 gr. şırınga

PROMARKER C - Çürük Belirleyici Jel

1- Açıklama

PROMARKER C, dentindeki çürüklerin tespiti için kullanılır.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

PROMARKER C gibi çürük indikatörleri, dolgu yapımı esnasında, hekimlerin renklenmiş dentin ile çürük dentini ayırt etmelerine yardımcı olmak üzere kullanılan malzemelerdir. Renklenmiş dentin bakteri ile kontamine olmamıştır ve sağlıklı dentinden daha yumuşak yapıda olmasına rağmen kaldırılmaması gerekir, buna karşılık, enfekte dentin dolgu yapılmadan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır.

3- Kullanım şekli

- Dişi tam olarak izole ediniz
- Çürük dişi yıkayıp kuruladıktan sonra, ilgili bölgeye bir damla PROMARKER C damlatınız.
- 10 saniye bekleyiniz ve su ile yıkayınız.
- Mavi-Mor renge boyanmış olan diş çürük bölgesini diştten uzaklaştırınız
- Bu işlemi, artık hiç bir bölge mavi-mora boyanmayıncaya yani çürük dentin tamamen uzaklaştırılıncaya kadar gerekli sayıda tekrarlayınız.
- Mavi-Mor renge boyanan dokuların kaldırılmasının ardından, kavite doldurulmaya hazırdır.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Deriye, göze ya da giysilere direkt temasından sakınınız. Göze temas halinde: su ile iyice yıkayınız ve doktorunuza baş vurunuz. Deriye ya da giysilere temas halinde derhal su ve sabunla yıkayınız.

6- Uyarı:

Çapraz kontaminasyon ya da enfeksiyonu önlemek için, çürük kavitesine ürünü doğrudan doğruya şişesinden ya da şırıngadan uygulamayınız (tek kullanımlık bir uygulama ucu kullanınız). Deriye, göze ya da giysilere direkt temasından sakınınız. Göze temas halinde: su ile iyice yıkayınız ve doktorunuza baş vurunuz. Deriye ya da giysilere temas halinde derhal su ve sabunla yıkayınız. Ürünü, yalnızca tedavi edilmekte olan dişe uygulayınız. Ürünün var olan diğer dolgulara, özellikle de marjinal bölgelerden temas etmemesine dikkat ediniz. Bu bölgelerde oluşan renklenmelerin giderilmesi çok zordur.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz. Kullanım sonrası kapağını kapatarak aktivasyonunu koruyunuz.

NOT:

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Profesyonel diş hekimleri dışında kullanılması uygun değildir. Ürünlerin kullanılması bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanım kılavuzunda verilen bilgiler ve uyarılar doğrultusunda kullanılmasını öneririz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.



PROMIDA DIŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

75. YIL MAH. KÜÇÜK ORGANİZE SANAYİ 3. CADDE 6A ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

info@promida.com.tr www.promida.com.tr